

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Tên thiết bị: RĂNG SỨ VENEER

Chủng loại: Phục hình veneer

2. Mục đích sử dụng:

Răng sứ Veneer sản phẩm dùng để thay thế cho răng hư tổn, điều trị các bệnh lý về răng, thay thế, sửa chữa răng hỏng, phục hình lại răng và thực hiện chức năng ăn nhai hoặc nhằm phục vụ mục đích thẩm mỹ.

3. Chỉ định:

Răng sứ Veneer là khi bác sĩ tiến hành gắn răng sứ veneer lên mặt răng của bệnh nhân và bác sĩ sẽ kết hợp thêm việc kiểm tra độ kênh của phần sứ và răng thật để kịp thời điều chỉnh lại cho phù hợp. Sau đó, nha sĩ sẽ sử dụng chất liệu dán đặc biệt kết hợp với chiếu tia laser để cố định mào răng sứ hợp kim.

4. Chống chỉ định cơ bản:

- Tình trạng viêm nha chu, viêm tủy, nhiễm trùng chưa được điều trị triệt để.
- Răng lung lay cấp độ cao, mô mềm sưng đau, mô quanh răng chảy máu nhiều.
- Răng không đủ chiều cao lâm sàng hoặc diện tích lưu giữ mào.
- Bệnh nhân có thói quen nghiện răng nghiêm trọng không kiểm soát
- Bệnh nhân dị ứng với vật liệu sứ hoặc kim loại.

5. Cảnh báo và thận trọng:

- Không phục hình răng sứ trên nền răng còn viêm, chưa hoàn tất điều trị nội nha hoặc nha chu.
- Cân nhắc kỹ khi chỉ định răng sứ cho bệnh nhân có thói quen nghiện răng mức độ nặng: cần đánh giá nguy cơ và phối hợp khí cụ bảo vệ nếu cần.
- Đảm bảo thiết kế phục hình phù hợp với phân bố lực, không gây quá tải tại vùng tiếp xúc khớp cắn hoặc cầu dài.
- Tránh chỉ định các vật liệu răng sứ giòn cho vùng chịu lực lớn nếu không có hỗ trợ từ cấu trúc răng trụ ổn định.

- Không dùng sản phẩm nếu phát hiện sai thiết kế hoặc bất thường về vật liệu.
- Trong trường hợp phục hình bị bong sút, nứt vỡ hoặc mất ổn định, cần đánh giá lại toàn diện khớp cắn, thói quen chức năng và nền mô nâng đỡ trước khi thay thế.

6. Hướng dẫn sử dụng:

Bệnh nhân được bác sĩ chuyên ngành nha khoa thực hiện các thao tác kỹ thuật để lắp Răng sứ Veneer cho bệnh nhân. Và được bác sĩ sẽ hướng dẫn cụ thể các chi tiết sau khi được lắp sản phẩm.

7. Điều kiện bảo quản:

- Sản phẩm được bảo quản tại nơi sạch sẽ, khô ráo, thoáng mát. Tránh ánh sáng trực tiếp của mặt trời, không để sản phẩm trong môi trường ẩm ướt, bẩn, ô nhiễm, độc hại.
- Bảo quản trong hộp, thùng khi chưa sử dụng.
- Không sử dụng sản phẩm đã qua sử dụng, rách nát, dính bẩn, quá hạn sử dụng hoặc có đặc điểm bất thường với những quy định tiêu chuẩn cơ sở này.

8. Tên cơ sở sản xuất

Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN KHANG LAB

Địa chỉ: 169 Đường Lê Cao Lãng, Phường Phú Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 21/03/2026



NGUYỄN THỊ NGỌC HẠNH